



Incides® N

## TÜCHER ZUR ALKOHOLISCHEN SCHNELLDESINFEKTION

- ▲ Aldehydfrei
- ▲ Gebrauchsfertig mit angenehmen Geruch
- ▲ VAH-gelistet




# Incides® N

## TÜCHER ZUR ALKOHOLISCHEN SCHNELLDESINFEKTION

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Breites Wirkspektrum gegen Bakterien (auch TB) und Hefen	Hohe Desinfektionssicherheit auf allen alkoholbeständigen Flächen
Gebrauchsfertige Tücher mit besonders kurzen Einwirkzeiten	Optimale Desinfektion in Kombination mit sicherer und gezielter Anwendung
Dermatologisch begutachtet und mit sympathischer Duftnote	Hohe Anwendersicherheit und angenehm im Gebrauch
Nachgewiesene Wirkstoffabgabe aus dem Tuch in angegebener Konzentration.	Hohe Anwendersicherheit, Wirksamkeitsgutachten basieren auf den realen Arbeitsbedingungen

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION	EINWIRKZEIT
<b>VAH-Liste (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)</b>		Min.
Mit Mechanik und geringer Belastung	konzentriert	5
Mit Mechanik und hoher Belastung	konzentriert	5
<b>IHO-Viruzidie-Liste</b>		Min.
Prüfung gemäß DVV mit /ohne Belastung		
Begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV, HCV)	konzentriert	0,5
Rotavirus	konzentriert	1
Adenovirus	konzentriert	5
Papova-Viren/Polyomavirus SV40	konzentriert	10
<b>EURO-Normen</b>		Min.
EN 13727 (geringe und hohe Belastung)	konzentriert	1
EN 13624 (levurozid)	konzentriert	1
EN 14348 (tuberkulozid)	konzentriert	1
<b>Zusätzliche Wirksamkeiten</b>		Min.
TBC **	konzentriert	1
MRSA	konzentriert	1
Influenza Viren *** (H1N1, A/H5N1)	konzentriert	0,5

\* gem. RKI-Empfehlung 1/2004 \*\* Flächendesinfektion gem. DGHM 2001 \*\*\* aufgrund begrenzter Viruzidie

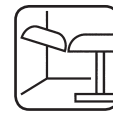

Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte

CE 0297



Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Ⓣ BIOZID N-12165

### EINSATZBEREICHE

Zur Desinfektion von medizinischen Geräten und Instrumenten aus alkoholbeständigem Material, Hand- und Winkelstücke in der Zahnarztpraxis, Griffstücke, etc., sowie von alkoholbeständigen Flächen aller Art.

**Desinfektionsmittel sicher verwenden.**

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

### ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Gegenstände / Flächen abwischen und komplett benetzen. Nicht nachwischen. Dose wieder verschließen.

### ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g Tränklösung sind enthalten: 35 g 2-Propanol, 25 g 1-Propanol

### GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

### BESTELLINFORMATIONEN

Incides® N	30 131 50
Dose	6 x 90 Tücher
Incides® N	30 131 60
Nachfüllpack	5 x 90 Tücher



### UNSERE HYGIENELEISTUNGEN SCHÜTZEN LEBEN ...

Worldwide Headquarters  
370 Wabasha Street N  
St. Paul, MN 55102  
[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

Regional Office  
Ecolab GmbH  
Erdbergstrasse 29  
1030 Wien, Österreich  
Phone +43 1 715 2550-0  
Fax +43 1 715 2550-2856  
[www.ecolabhealthcare.at](http://www.ecolabhealthcare.at)

Regional Office  
Ecolab Schweiz GmbH  
Kriegackerstr. 91  
CH-4132 Muttenz  
Phone +41(0) 614 66 94-66  
Fax +41(0) 614 66 94-55  
[www.ecolab-suisse.ch](http://www.ecolab-suisse.ch)

